



BM-02 Monitor dychu kojencov

Monitor BM-02 Nanny je zariadenie, ktoré **sleduje pravidelnosť dychu a pohyby kojenca**. Účelom výroby je upozorniť na prípadné nebezpečenstvo takzvaného „syndrómu náhleho úmrtia kojenca“ (tiež SIDS, Sudden Infant Death Syndrome).

o [Prohlášení o shodě - BM-02 \(PDF 282,02 kB\)](#)

Popis

Deti do jedného roku majú nepravidelné dýchanie a z nevyjasnených príčin sa niekedy stane, že se kojenec „zabudne“ nadýchnuť. K zástave dychu však môže dôjsť i z iných príčin (zvratky, prejav choroby apod.).

Čo Nanny ponúka:

Včasný varovanie

Nanny vďaka citlivej snímačej podložke sleduje dýchanie a pohyby bábätka. Pokiaľ sa dieťa nenadýchne počas 20 sekúnd alebo frekvencia dýchania poklesne pod 8 nádychov za minútu, spustí hlasitý alarm sirénkou. **Nanny stráži a vy môžete odpočívať.**

Jednoduché ovládanie

Naozaj ľahké – podložku umiestnite do postelky pod matrac a kontrolnú jednotku pripevnite na bok postelky. Potom uložte dieťa do postelky a prístroj zapnete. Správnu činnosť Nanny si môžete kedykoľvek overiť (nádych / výdych = bliknutie kontrolky).

Jednoduché ovládanie

Nanny je certifikovaná ako zdravotnícky prístroj triedy II.B. Nevyžaduje umiestnenie senzora priamo na telo bábätka, ktoré tak nie je vystavované škodlivému elektromagnetickému žiareniu. Používa sa v zdravotníckych a dojčenských ústavoch a pôrodniciach.

Podrobnejšie informácie nájdete na stránke **kojeneckého alarmu BM-02 NANNY**.

Technické parametre

Napájanie

2 x 1,5 V AA alkalické batérie

Priemerná životnosť batérií

6 mesiacov

Odporúčaná váha dieťaťa

od min. 2 kg do max. 15 kg

Snímacia podložka

rozмеры 500 x 305 x 15 mm, váha 1000 g

Vyhodnocovacia jednotka

rozмеры 140 x 80 x 35 mm, váha 123 g

Zdravotnícka pomôcka

II.B, kód ŠÚKL 739 29

